



Surfa'safe Premium Anios - Spray 750 ml

Mousse détergente désinfectante pour toutes les surfaces, équipements, dispositifs médicaux et surfaces alimentaires.

- Solution prête à l'emploi.
 - **Bactéricide** en 3 min, 20°C : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561
 - **Levuricide** en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562
- Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus

Mode d'emploi :

S'utilise sans dilution. Appliquez la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Il est nécessaire de bien répartir le produit. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Parfum agrume très odorant.

Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients

Livré en Flacon de 750 ml avec pistolet mousser.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.