

## FICHE TECHNIQUE



### Armoire défibrillateur intérieur et extérieur - Aivia 200 - ventilée, sans chauffage - sur secteur

Armoire utilisable en intérieur comme en extérieur livré avec adaptateur sur secteur 24V. Avec alarme sonore utilisation/anti-vol et éclairage par détection

L'armoire de protection extérieure ventilée AIVIA 200 sans chauffage est conçue spécifiquement pour stocker et protéger les défibrillateurs automatiques externes (DAE) dans des environnements extérieurs.

Résistante aux intempéries, cette armoire offre une solution de rangement sécurisée pour les dispositifs médicaux vitaux.

**Ce modèle est ventilée, mais ne possède pas de chauffage. Il est donc contre-indiqué de l'installer dans des régions où les températures peuvent être négatives, au risque d'endommager le défibrillateur.**

**[ Ne jamais installer l'armoire directement exposée au soleil au risque d'exposer le défibrillateur à des températures excessives. ]**

----

#### Équipement :

##### Alarme Sonore

Déclenchée à l'ouverture (de 70 à 105 dB à 1m en fonction des modèles).

##### Alimentation sur secteur

24V DC TBTS (Très Basse Tension Sécurité).

##### Éclairage et alarme

Éclairage par détection. Alarme visuelle locale informant des anomalies.

**Protection et sécurité optimales** : L'armoire AIVIA 200 est équipée d'un boîtier en polycarbonate résistant aux UV, offrant une protection fiable contre les intempéries, les rayons du soleil et les impacts. Cela garantit que le DAE est protégé des éléments extérieurs et reste en parfait état de fonctionnement. Elle est dotée d'un support en ABS vert.

**Conception ergonomique** : L'ouverture frontale de l'armoire permet un retrait facile du défibrillateur, ce qui est essentiel dans les situations critiques nécessitant une intervention rapide.

**Visibilité optimisée** : L'armoire est équipée de voyants lumineux, assurant une visibilité maximale même dans des conditions de faible luminosité. Cela permet de repérer facilement l'emplacement de l'armoire, aidant ainsi les intervenants à localiser le défibrillateur rapidement.

**Maintenance facile** : L'armoire AIVIA 200 est conçue pour faciliter la maintenance. L'ouverture frontale permet un accès aisé à l'intérieur de l'armoire pour les vérifications régulières et le remplacement des consommables, assurant ainsi la disponibilité continue du défibrillateur.

**Compatibilité universelle** : Cette armoire est conçue pour accueillir la plupart

des modèles de défibrillateurs automatiques externes disponibles sur le marché. Elle offre une flexibilité d'utilisation pour les organisations médicales et les lieux publics équipés de différents types de DAE.

**Fixation :**

Les fixations doivent être adaptées au type du support sur lequel l'armoire est fixée.

L'armoire est livrée avec un gabarit de perçage pour faciliter l'installation.

**Branchement :**

L'armoire doit être alimentée sur secteur en 24VDC (adaptateur secteur 24V livré avec)

Toutes les instructions concernant l'installation électrique sont indiquées dans le manuel livré avec.

**Poids :**

L'armoire pèse 2.7kg

**Dimensions :**

Largeur : 38 cm

Hauteur : 42 cm

Profondeur : 20 cm

**Normes :**

Conforme aux normes EN61000-6-2: 2005, AMD A1: 2006 et EN61000-6-3: 2007, AMD A1: 2011 conformément aux directives sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU

Conforme à la norme EN 62368-1:2014+A11:2017 conformément à la directive sur la basse tension 2014/35/EU