



**robé**  
+ médical

### Désinfection instrument à froid Anios Steranios 2% Prêt à l'emploi

### Désinfection à froid de l'instrumentation médicale, chirurgicale et endoscopique.

Solution Anios prête à l'emploi conseillée pour l'instrumentation thermosensible. Trempage 20 mn (1h pour action sporicide). Contient 2% de glutaraldéhyde . Ph neutre. Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide, actif sur HIV 1, Hépatite B, Herpès virus, BK, Helicobacter pylori et Mycoplasme.

Conformités aux normes :

NF EN1040, NFT72-151, NFT72-171, NFT 72-301, NFT 72-201, NF EN 1275, NFT 72-190, NFT 72-230/231, NFT 72-180).

Conditionné en bidon de 5 L.  
Prêt à l'emploi.

Matériel médical CE

Pour un contrôle précis du taux de glutaraldéhyde actif des solutions Steranios, [découvrez les bandelettes de contrôle Anios.](#)

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.*

*Très toxique pour les organismes aquatiques. Entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être corrosif sur les métaux.*