



### Dilatateurs de pis avec vaseline - Pour les bovins - Boîte de 20 dilateurs

Dilatateurs permettant de faciliter la traite des bovins

Ces dilateurs s'utilisent en cas d'inflammations, blessures, crevasses ou gerçures des trayons constituant des petites fentes épidermiques qui s'infectent.

S'utilise également lors de traites compliquées, après intervention opératoire de sténoses des trayons, aphtoses, abcès avec tuméfaction des mamelles et abcès des bouts de trayons.

Les dilateurs s'utilisent avec un gel lubrifiant. Ceux-ci possèdent déjà de la vaseline.

#### Mode d'emploi :

- Se laver soigneusement les mains
- Bien désinfecter le bout des trayons autour du canal lactaire
- Plonger l'aiguille de dilatation dans le compartiment latéral rempli de vaseline en faisant une rotation de gauche à droite en la retirant afin qu'adhère un peu de vaseline
- Introduire avec précaution l'aiguille de dilatation dans le canal du trayon jusqu'à l'indicateur
- Avant chaque traite, retirer l'aiguille de dilatation et la détruire.
- Après la traite, introduire une nouvelle aiguille de dilatation.

N'utiliser chaque aiguille qu'une seule fois et ne pas laisser celle-ci plus de 12h.

Fabriqué en Allemagne