



**Masque Ffp2 Carine Medical - forme bec de canard EN 149:2001 - Boîte de 30 masques**

Niveau de filtration Ffp2 selon normes EN 149:2001+A1:2009 - Non Réutilisable

Demi-masque filtrant de classe FFP2 5 couches assurant la protection du porteur et garantissant l'étanchéité. Protection contre les particules liquides et solides.

Fabricant européen (Allemagne).

**Ne contient aucun graphène.**

Filtre 4 couches :

- Anti-virus
- Anti-bactéries
- Anti-pollution
- Anti-allergènes

Conforme aux normes en vigueur **EN 149:2001+A1:2009**.

- Usage unique
- Fixation aux oreilles
- Pince nez

La boîte de 30 masques vendue à 9,60 € TTC (à partir de 10 boîtes achetées).

**Conseils d'utilisation:**

- 1- Sortez le masque FFP2 de l'emballage et étirez-le.
- 2- La partie pince-nez est tournée vers le haut, le côté sans pince-nez fait face au visage et les élastiques sont tirés.
- 3- Faites d'abord face au masque contre le menton, puis tirez l'élastique vers l'oreille et accrochez-le à l'oreille jusqu'à ce qu'il soit confortable.
- 4- Ajustez le masque FFP2 pour qu'il s'adapte au visage et moulez le pince-nez autour de votre nez pour obtenir une étanchéité sûre.

Dimensions d'un masque : 10,5 x 16 cm.

Conditionnés par boîte de 30 masques emballés individuellement.

Equipement de protection individuelle CE.