

Pansement Israélien traumatologique compressif Olaes® - 10 cm - Tactical Medical Solutions

Pansement compressif pour plaie hémorragique

Dernière génération de bandages de traumatologie, ce pansement compressif s'utilise sur les différentes parties du corps en cas d'hémorragie.

- 3 m de gaze stérile 4 plis,
- une feuille de plastique occlusive amovible
- un pansement de traumatologie OLAES® (séparé du reste)
- une coupelle de pression qui peut également servir de protection oculaire rigide
- sans latex

Le tout, conditionné dans un packaging sous vide et stérile.

Le plus : Ce produit ne contient ni crochets, ni clips. Les bandes Velcro® empêchent le rouleau élastique de se dérouler accidentellement et facilite le processus d'application.

Dimension :
10 cm (4")

Mode d'emploi :

1/ Placer le pansement sur la blessure avec la barre de pression directement sur la plaie.

2/ Envelopper fermement le bandage autour du membre concerné.

3/ Sécuriser avec le clip en plastique

[Existe également en 15cm](#)

Compris dans le pansement :

- Enveloppe élastique avec "bandes de contrôle" intégrées pour éviter tout démêlage par inadvertance
- 3 m de gaze stérile 4 plis
- La feuille occlusive en plastique incluse dans la poche du pansement
- Tasse de pression transparente qui concentre la pression sur le site de la plaie et permet une inspection visuelle d'une hémorragie incontrôlée

