

Pansement absorbant adhésif non tissé - avec compresse centrale - Boîte de 50

Pansement non adhérent à la plaie grâce au voile recouvrant la compresse.

Pour le recouvrement des plaies post-opératoires ainsi que la protection des plaies superficielles (écorchures, coupures) et des plaies suturées peu exsudatives.

- Adhésif des 4 côtés pour une protection optimale de la plaie.
- Support non tissé pour une réduction des risques de souillure par les fluides corporels et une protection durable de la plaie.
- Tenue optimale, ne laisse pas de résidus sur la peau.
- Pansement stérile limitant le risque d'infection.
- Haute tolérance cutanée (hypoallergénique).
- N'adhère pas à la plaie grâce au voile recouvrant la compresse.

Dimensions :

- 8 x 10 cm - Boîte de 50

Composition :

Support en non-tissé extensible à base de fibres polyester avec compresse centrale absorbante non adhérente.

Absence de latex, phtalates et de produits d'origine animale.

Vendu sous pochette individuelle stérile.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Boîte protectrice de 50 pochettes.

Matériel médical CE.

Conseils d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité de la pochette avant usage.
- Nettoyer soigneusement la partie à protéger et son pourtour.
- Sortir le pansement de son emballage du côté indiqué et ôter les ailettes de protection.
- Appliquer le pansement de telle sorte que la compresse centrale recouvre la plaie.
- Bien faire adhérer le pansement sur les 4 côtés.
- Éviter les tensions à la pose.
- Renouveler le pansement aussi souvent que nécessaire.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.

Durée : court terme

Utilisation : entre 60 minutes et 30 jours

