



### Porte urinal plastifié blanc - avec et sans bouchon

Permet la suspension d'urinaux en plastique

Porte urinal à pans coupés arrondis en fil d'acier recouvert de plastique PE avec ou sans bouchon.

S'accroche directement au bord du lit.

- Facile à accrocher
- Porte urinal plastifié
- Coloris blanc
- Capacité maximale de 2 kg
- Ne se stérilise pas (ni autoclave, ni poupinel, ni air sec chaud)

#### Mode d'emploi :

Accrocher le porte urinal au bord du lit et insérer l'urinal la tête vers le haut.

#### Matière :

En fil d'acier plastifié blanc en polyéthylène. Chaînette en acier avec bouchon plastique adaptable.

#### Dimensions :

Diamètre du panier : 127 mm  
Hauteur du panier : 135 mm  
Profondeur du panier : 117 mm  
Hauteur totale avec les accroches : 312 mm  
Largeur du crochet : 47 mm  
Diamètre du bouchon : 65 mm

#### Nettoyage :

En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le polyéthylène

#### Précautions d'emploi :

Bien accrocher le porte urinal à son support. Après chaque utilisation mono personnel, nettoyer et désinfecter les fils et plus particulièrement le bouchon si utilisé.

Si le plastique est attaqué, ne plus utiliser car risque de rouille.

Capacité de poids maximum 2Kg.

Bien nettoyer après chaque usage risque de contamination.