

## FICHE TECHNIQUE

### Test de grossesse urinaire de type cassette Romed

Pour la détection rapide de l'hormone de grossesse Hcg dans les urines.

Pour une information de votre état de grossesse en 5 minutes maximum.

Détails notice:

- Verser 3-5 gouttes d'urine sur le test.
- Attendre 5 minutes l'apparition des lignes colorées, lire les résultats: 2 lignes enceinte, 1 ligne pas enceinte.
- Ne pas lire les résultats après plus de 10 minutes.
- Utiliser de préférence avec la première urine du matin.

**Vendu par lot de 2 pour vous permettre une confirmation du résultat .**

Dimensions: 14 x 2 cm.

Conserver au sec et à l'abri de la lumière, entre 4° et 30°C.

Usage unique.

Conditionné sous emballage individuel étanche et opaque.

Vendu par lot de 2.

Matériel médical CE.

***NB : disponible à la vente aux professionnels de la santé et aux particuliers.***

