

Thermomètre infrarouge sans contact pour animaux - Visiofocus Animal

Mesure oculaire, auriculaire, gingivale et rectale pour les animaux

Thermomètre médical infrarouge pour la mesure à distance de la température corporelle des animaux. Il permet une mesure de température instantanée, hygiénique et précise sans aucun contact avec l'animal.



Caractéristiques principales :

Mesure à distance: Habituellement, la température des animaux est prise en introduisant un thermomètre traditionnel dans le rectum: cette procédure est invasive et gênante pour l'animal et inconfortable pour ceux qui l'exécutent, surtout pour un propriétaire sans expérience dans le domaine vétérinaire. VisioFocus Animal, quant à lui, est capable de prendre la température corporelle des animaux, à distance et sans les toucher, sans les déranger, en quelques secondes et de manière extrêmement simple. La mesure peut être effectuée sur l'oeil (zone recommandée) ou dans l'oreillette ou dans la zone gingivale ou rectale, toujours à distance, dans le cas où, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de détecter la température sur l'oeil.

Non-laser: VisioFocus Animal n'utilise pas de rayonnement laser, il est sûr et inoffensif même lorsqu'il est pointé dans l'oeil. Les feux de pointage sont des feux à LED normaux, dont la sécurité photobiologique est vérifiée selon la norme EN 62471.

Multifonctionnalité :

VisioFocus ANIMAL est capable de mesurer :

- 1) la température corporelle des animaux et la température de tout objet et liquide dont la température est comprise entre 1 et 80 °C, par exemple :
- 2) la nourriture
- 3) l'eau du bain
- 4) l'environnement (par exemple à l'intérieur de la niche).

Caractéristiques techniques :

Nombre de boutons : 3

Piles (généralement pas incluses) : 4, AAA/LR03 (préférablement alcaline)

Durée de vie des piles de qualité : jusqu'à 3 années ou 30.000 mesures (en fonction de l'usage)

Distance de l'animal durant la mesure : indiquée par un système optique de positionnement (env. 6 cm)

Couleur des lumières LED : ambré

Rétroéclairage de l'écran : oui, couleur verte

Dimensions : mm 138 x 43.5 x 21.5

Poids : gr. 90 (avec piles)

Plage de mesures (bouton "chien&chat") : de 32.0 à 43.5°C (89.6/110.3°F)

Plage autres mesures (bouton "niche") : de 1.0 à 80.0°C (33.8/176.0°F)

Température ambiante de fonctionnement: -7,0/45,0°C (19.4/113.0°F) (1)

(1) Lorsque la température ambiante est inférieure à 16°C (60.8°F) ou supérieure à 40°C (104.0°F), la précision et la plage de fonctionnement ne sont pas garanties et l'écran affiche respectivement "Lo.5" ou "Hi.4", en alternance avec la valeur de température.

Plage de facteur de correction : -3,0/+5,0°C Plage dynamique par rapport à la correction définie par défaut par le constructeur

Certifications :

ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016