



Thermomètre vétérinaire sans contact - Robemed

Infrarouge - Sans danger - Rapide et précis

Ce thermomètre est conçu pour mesurer la température animale corporelle avec un décalage dynamique pour la température ambiante et la température corporelle.

Ses fonctionnalités avancées et notamment sa sonde infrarouge permettent de mesurer la température avec une grande précision et une performance stable.

Ce thermomètre se distingue par sa simplicité d'utilisation ; Sa compacité, sa légèreté et son autonomie en batterie en font un outil particulièrement pratique.

Il indique les variations de température par une notification sonore et l'affichage numérique rétro-éclairé de trois couleurs permet une lecture facile.

La température se prend à une distance de 1 à 3 cm du rectum, de l'oreille ou de l'œil de l'animal.

Caractéristiques :

- **Infrarouge et sans contact**

- **Rapide et précis**

- Affichage numérique LCD Rétroéclairé

- Trois boutons de fonction : Set, mémo et mode

- Alarme 3 couleurs : Vert - Jaune - Rouge

- Deux modes de température : échelle Celsius et Fahrenheit.

- S'éteint automatiquement après 20 secondes

Plage de mesure : de 35.0 à 44.9 °C (95-113°F)

Précision : environ 0.2°C (0.4°F)

Distance de mesure : 1 à 3 cm

Température d'utilisation : 32,0 °C à 42,9 °C (85,9°F - 109,2°F)

Stockage de Données : Capacité de stockage de 64 groupes de données de mesure

Batterie : Fonctionne avec 2 piles 3V AAA (non incluses)

Taille : 138 x 95 x 40 mm

Poids : 76 g (98 g avec piles)

Mesure de la température corporelle de l'animal :

Appuyez sur le bouton de mesure pour allumer le thermomètre et l'écran de démarrage s'affiche. Après l'auto-test de démarrage (POST) et deux bips, il s'affiche prêt pour la mesure.

Assurez-vous que le thermomètre est en mode corps animal (body).

Gardez une distance de 10 mm à 30 mm entre le rectum ou l'oreille de l'animal et la sonde. Appuyez sur le bouton de mesure et lorsqu'il émet un « bip », la mesure est terminée et la valeur sera modifiée. Si la valeur de mesure dépasse la valeur d'alarme, un écran rouge s'affiche à titre indicatif.

Après la mesure, si le thermomètre est inactif pendant 20 secondes, il affichera « OFF » et donnera un « bip » et s'éteindra automatique.

Matériel médical CE

Normes : CEI 60601-1 CEI 60601-1-2 ISO 80601-2-56