

# Cidalkan

## Détergent Désinfectant



Avant utilisation, vérifier la date de péremption. Ne pas mélanger à d'autres produits.


### Pulvérisateur 1L / bidon 5L




**1** Appliquer **Cidalkan** directement sur la surface à traiter. Le bidon de 5L est une recharge pour le pulvérisateur.



**1** Appliquer **Cidalkan** sur un support non-tissé propre.

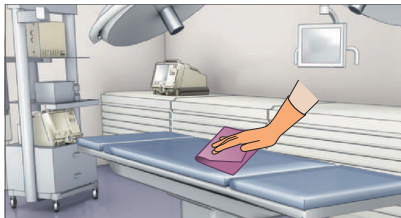

**2** Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes (15min pour C. difficile). Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).

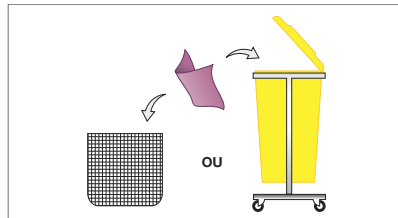

**3** Jeter le support souillé ou l'évacuer dans le filet de récupération pour le linge sale. Changer de lingette pour chaque équipement ou dispositif médical.


### Lingettes



**1** Sortir une **Cidalkan** lingette de son emballage. Bien refermer le couvercle après utilisation.



**2** Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes (15min pour C. difficile). Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).

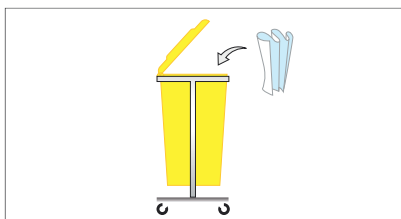

**3** Jeter la lingette. Changer de lingette pour chaque équipement ou dispositif médical.

### Description

Usage par essuyage humide sur les surfaces, les équipements (moniteurs) et les dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs (sondes endocavitaires, sondes d'échographie externes et endocavitaires (SEE), endoscopes gainés, testeurs de glycémie, thermomètres, respirateurs, générateurs d'hémodialyse, unit dentaire...).

### Spectre d'activité

Bactéricide et actif sur *Acinetobacter baumannii*. Levuricide et Fongicide. Virucide : actif sur Poliovirus Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Vaccine et virus enveloppés tels que Coronavirus, VHB, VHC, H1N1, Herpès virus...

Actif sur les spores de *Clostridium difficile*. Activité spécifique au spray : *Bacillus subtilis*.

Activité spécifique aux lingettes : Papillomavirus humain HPV18 et HPV16 en conditions de propreté.

### Précautions d'emploi

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.

Le produit est classé :



Porter des lunettes de protection pour l'usage en spray.



Consulter la fiche de données de sécurité.

### Exceptions d'emploi

Tous les matériaux sensibles à l'alcool. Dans le cas de matériaux inconnus, faire un essai sur une petite surface.